

Masques « GRAND PUBLIC » catégorie 1

exclusivement réservés à des usages non sanitaires,
suivant la note d'information interministérielle du 29 mars 2020 mise à jour le 22 juillet 2020

- **Fabriquant:** Dolmen Manufacture SAS - Zone artisanale de Rucaer, F- 22200 PABU – tél. 02 96 40 60 09, sous références **DPA-UNS1** pour porteur adulte et **DPE-UNS1** pour porteur enfant.
- **Domaine d'utilisation :** Ce masque est destiné au milieu professionnel ou grand public et est exclusivement réservé à des usages non sanitaires. **Il est destiné à prévenir les projections de gouttelettes vers un tiers.** L'utilisation de ce masque s'inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d'organisation du travail ainsi que des gestes barrières. Ce masque individuel est destiné à être proposé **aux professionnels amenés à rencontrer un grand nombre de personnes lors de leur activités** (hôtesse de caisses, agents des forces de l'ordre). Il n'est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients. Ce masque pourra être indifféremment proposé aux professionnels ou au grand public.
- **Contexte d'utilisation :** ce masque est strictement adapté à la crise sanitaire liée à la COVID-19 et ne remplace pas les gestes barrières:



Lavez-vous très régulièrement les mains



Toussez ou éternuez dans votre coude ou dans un mouchoir



Utilisez un mouchoir à usage unique et jetez-le



Saluez sans se serrer la main, évitez les embrassades



Respecter une distance de 1 mètre

- **Performances :** mesurées selon rapport N° 2020-06-22-017-30 du 08.07.2020 de l'Institut Français du Textile et de l'habillement IFTH avec prétraitement 30 cycles de lavages 60°C, séchage tambour 1 point et repassage 120°C:

- Efficacité de filtration en %: **97** pour particules de 3 µm
- Perméabilité à l'air pour une dépression 100 Pa: **306** L./m².s-1, soit plus de 3 fois supérieur au niveau exigé



- **Matériau:** couche unique textile nontissé hydrolié, 85 gr./m², polyester/viscose
- **Lien utile :** <https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/masques-grand-public>

Recommandations d'utilisation

Limite d'utilisation : le temps de port du masque est limité à **4 heures**. Conception établie et testée sur porteur pendant 4 heures par nos soins. Il faut changer le masque quand vous souhaitez boire ou manger / quand il devient difficile de respirer / si le masque s'humidifie ou est mouillé par les intempéries / si le masque est endommagé / si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

Manipulation des masques :

- avant de mettre un masque, se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique ;
- appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche et veiller à l'ajuster au mieux sur le visage ; vérifier l'absence de jet d'air dans les yeux lors d'une expiration forte ;
- lorsque l'on porte un masque : éviter de le toucher; ne pas déplacer le masque ;
- chaque fois que l'on touche un masque usage, se laver les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique ;
- pour retirer le masque : se laver les mains à l'eau et au savon ou avec une solution hydroalcoolique , décrocher l'enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter immédiatement dans une poubelle fermée ou isolez le dans un sac en plastique en attendant de le laver; se laver les mains avec de l'eau et au savon ou à l'aide d'une solution hydroalcoolique.



Entretien du masque : Avant la 1.ère utilisation le masque doit être lavé, séché au tambour ou au sèche-cheveux, repassé à maximum 120 °C. Après utilisation, le masque doit être isolé, soit pour être jeté, soit pour être lavé. Il est recommandé d'isoler le masque dans un sac plastique à jeter après usage ou dans un sac réutilisable à laver. Dans le cas du sac réutilisable, masque et sac peuvent être lavés ensemble et dans ce cas, sortir le masque du sac.

Stockage: les masques non utilisés sont à stocker propres et secs, dans un emballage propre hermétique et à l'abri de la lumière.

Avertissement : Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas au fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage. Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus. **En cas de détection de tout dommage du masque, ce dernier doit être jeté dans une poubelle à l'intérieur d'un sac hermétique.**

Décompte d'utilisation du masque : si le masque est entretenu dans les conditions indiquées, il peut être porté jusqu'au 30^{ème} lavage. En cas d'utilisation de plusieurs masques, il est conseillé de les identifier avec leur notice correspondante. Pour vous aider à suivre et gérer le décompte d'utilisation de vos masques, veuillez renseigner le tableau suivant en barrant la case correspondant à chaque utilisation, respectivement portée d'au maximum 4 heures:

utilisation 1	utilisation 2	utilisation 3	utilisation 4	utilisation 5	utilisation 6	utilisation 7	utilisation 8	utilisation 9	utilisation 10
utilisation 11	utilisation 12	utilisation 13	utilisation 14	utilisation 15	utilisation 16	utilisation 17	utilisation 18	utilisation 19	utilisation 20
utilisation 21	utilisation 22	utilisation 23	utilisation 24	utilisation 25	utilisation 26	utilisation 27	utilisation 28	utilisation 29	utilisation 30